

# FACE SHIELD Pro



日本製

## 防飛沫フェイスシールド



シールド展開サイズ

w297mm x h210mm

額からシールドまでの空間：40mm

1セット入り数

名称	材質	入り数
シールド	ポリエチレンテレフタレート/PET	2枚
フレーム	ポリプロピレン/PP	1個
ヘッドバンド	ポリエステル/ポリウレタン	1本
額パッド	ポリエチレン	2個

希望小売価格（税抜き）		別途送料
10セット/箱		オープン価格
交換シールド/5枚入り		オープン価格

### 軽くて、ずれにくい 簡単装着

- ✓ 軽量なので、長時間の作業も負担になりません。
- ✓ ラバーベルト(後方)・スポンジ(前面)の採用によりフィット感が良く、任意のサイズに調整可能。

(男女兼用、大人子供兼用)

- ✓ 装着は簡単、ただ被るだけ。

### 曇りにくく視界良好

- ✓ 顔とシールドの間に空間があるので息苦しさや、メガネを掛けたままでの装着が可能です。
- ✓ 曇りにくい構造になっております。
- ✓ 光学フィルム使用により、視界が鮮明です。

### つけやすく、外しやすい交換シールド

- ✓ フィルムが交換式のため、いつでもクリーンなシールドを使うことができます。
- ✓ フレーム、ヘッドバンドは洗浄可能です。

本製品は 株式会社ファソテックとの共同開発品です。

商品のデザイン、仕様、外観、価格は予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。

販売元



サンアロー株式会社

〒104-0032 東京都中央区八丁堀4-10-4  
ヒューリック八丁堀第二ビル  
TEL：03-3552-5981 FAX：03-3552-5989  
ホームページ：http://www.sunarrow.co.jp

製造元



サンアロー株式会社

新潟工場

〒954-0076 新潟県見附市新幸町5-1  
TEL：0258-61-4511 FAX：0258-61-4522

# フェイスシールド取扱説明書

※本品の使用前に、この取扱説明書のすべてを熟読お願いします


## 【禁忌・禁止】

破損状態での使用禁止

製品本来の使用目的と異なる用途での使用はしないこと。  
本製品の加工および改造等は絶対に行わないこと。

## 【形状、構造および原理等】

### (1)各部の名称

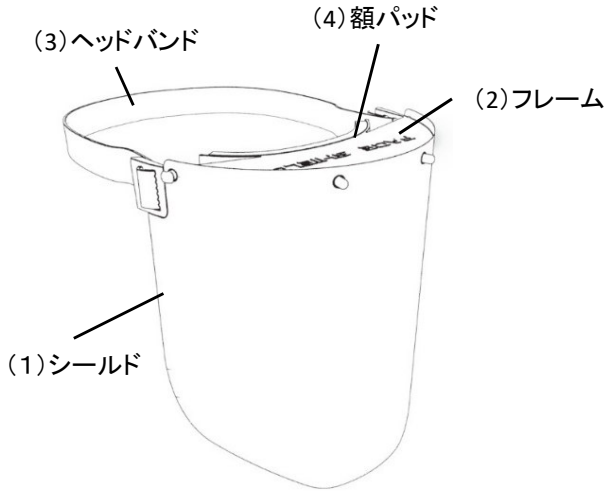

## 【使用目的、効能、効果】

本製品は顔正面からの液体飛沫の保護および微小粉塵などから極力、目・顔を保護する事を目的としています。

※本製品は使用者の目、身体の損傷を防ぐことを保証するものではありません。

## 【品目仕様】

シールドの折れキズ、亀裂のないこと。


※シールドには稀に製造上 unavoidable な若干の擦り傷および汚れがある事がありますが、品質には影響ありません。

## 【使用上の注意】


- (1)本製品は滅菌されておりません。
- (2)本製品使用中に発赤、びらん、掻痒等の皮膚障害と思われる症状が現れた場合は、本品の使用を中止し、適切な処置を行ってください。
- (3)有機溶剤など、不適合な薬品を使用した滅菌、清掃は製品の劣化、破損の原因となりますので行わないでください。
- (4)シールドは薄く、また透明性が高い為、シールドを認識しづらい事があります。目・手・顔などに怪我をしない様注意してご使用ください。
- (5)シールドに汚れが付着した場合には視界を低下させ安全の妨げになりますので、付属の予備シールドへ交換してください。  
\* 別売り 交換用シールドをご用意しております。
- (6)フレームの洗浄は80℃以下の温度で行ってください。  
破損には十分に注意してください。  
\* 蒸気消毒は行わないでください。
- (7)ご使用者による改造、修理は事故の原因となり危険ですので行わないでください。

## 【組立方法または使用方法】


- (1)フェイスシールド部品をパッケージから取り出す。
- (2)フレームに額パッドを貼り付ける。(片面テープ)
- (3)フレームの両端にヘッドバンドを通す。(長さ調整)
- (4)フレームにシールドをセットする。  
※両端のどちらか一方を先に嵌め込み(パチと音がするまで)順次、嵌めて行く。  
シールド部を顔前面にし、頭から装着する。  
※装着の際は周囲の人に本製品が当たらない事を確認する。

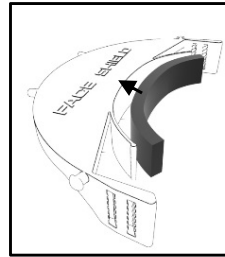


額パッドを貼り付ける

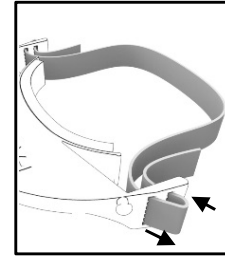

ヘッドバンドを通す

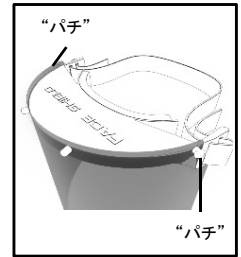

シールドをセット

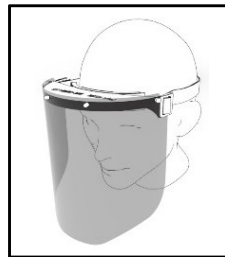

頭から装着する

## 【材質および入り数等】

名称	材質	入り数
シールド	ポリエチレンテレフタレート/PET	2枚
フレーム	ポリプロピレン/PP	1個
ヘッドバンド	ポリエステル/ポリウレタン	1本
額パッド	ポリエチレン	2個

## 【別売り品】

名称	材質	入り数
交換シールド	ポリエチレンテレフタレート/PET	5枚

## 【貯蔵・保管方法】

- (1)製品を保管する場合は、未開封状態で高温・多湿を避け塵や埃の無い清潔な場所に保管すること。
- (2)室温下で、水濡れに注意し、直射日光を避けて保管すること。

販売元



**サンアロー株式会社**

〒104-0032 東京都中央区八丁堀4-10-4  
ヒューリック八丁堀第二ビル  
TEL : 03-3552-5981 FAX : 03-3552-5989  
ホームページ : <http://www.sunarrow.co.jp>

製造元



**サンアロー株式会社**

新潟工場

〒954-0076 新潟県見附市新幸町5-1  
TEL : 0258-61-4511 FAX : 0258-61-4522